

SEV 3D サポーター サイズと装着方法


■ サイズとサイズ測定位置

サイズ

M	約34～38cm対応
L	約38～41cm対応
LL	約41～44cm対応

足を伸ばした状態で、ひざのお皿
周り中心を計測し、上記のサイズ
表からサイズをお選び下さい。

サイズ測定位置は
お皿中心周りです

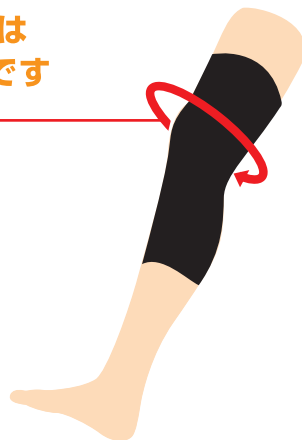

■ 装着方法

SEVロゴマークを前面・上部に
くるように装着してください。

SEVロゴマーク



■ 装着位置

SEV 3D サポーターを装着した
時に、左図の赤丸部分がひざに
くるように装着してください。

ひざの位置

